

Softa[®] Cloth CHX 2%

Pro prevenci rizik v infuzní terapii



Softa® Cloth CHX 2%

Utěrky pro povrchovou dezinfekci a dekontaminaci neinvazivních prostředků zdravotnické techniky

Jednu ze závažných příčin infekcí spojených se zdravotní péčí (HAI) představují katétrem způsobené infekce krevního řečiště (CRBSI).¹ Ty lze definovat jako přítomnost mikroorganismů v krvi pocházejících z intravenózního katétru.


Jedná se o jednu z nejčastějších, letálních a nákladných komplikací souvisejících s užitím centrálních žilních katetrů a také o nejběžnější příčinu nozokomiální infekce.

Třetina katétrem způsobených infekcí krevního řečiště vyžaduje léčbu v nemocnici, což souvisí s významnou finanční zátěží. Průměrné náklady na každou takovou hospitalizaci jsou odhadovány na 22 000 USD (přibližně 0,5 mil. Kč).²

Katétrem způsobené infekce krevního řečiště: 5 zdrojů¹

Obrázek níže ilustruje 5 zdrojů katéetrových infekcí. Utěrky Softa® Cloth CHX 2% mohou aktivně pomoci snížit riziko infekce skrze dekontaminaci a dezinfekci bezjehlového vstupu.

Před každou manipulací i po ní musí být bezjehlový vstup dekontaminován a vydezinfikován. Pouze dekontaminovaný a dezinfikovaný bezjehlový vstup je bezpečný, a tento postup tak představuje důležitý krok v prevenci nozokomiálních infekcí.

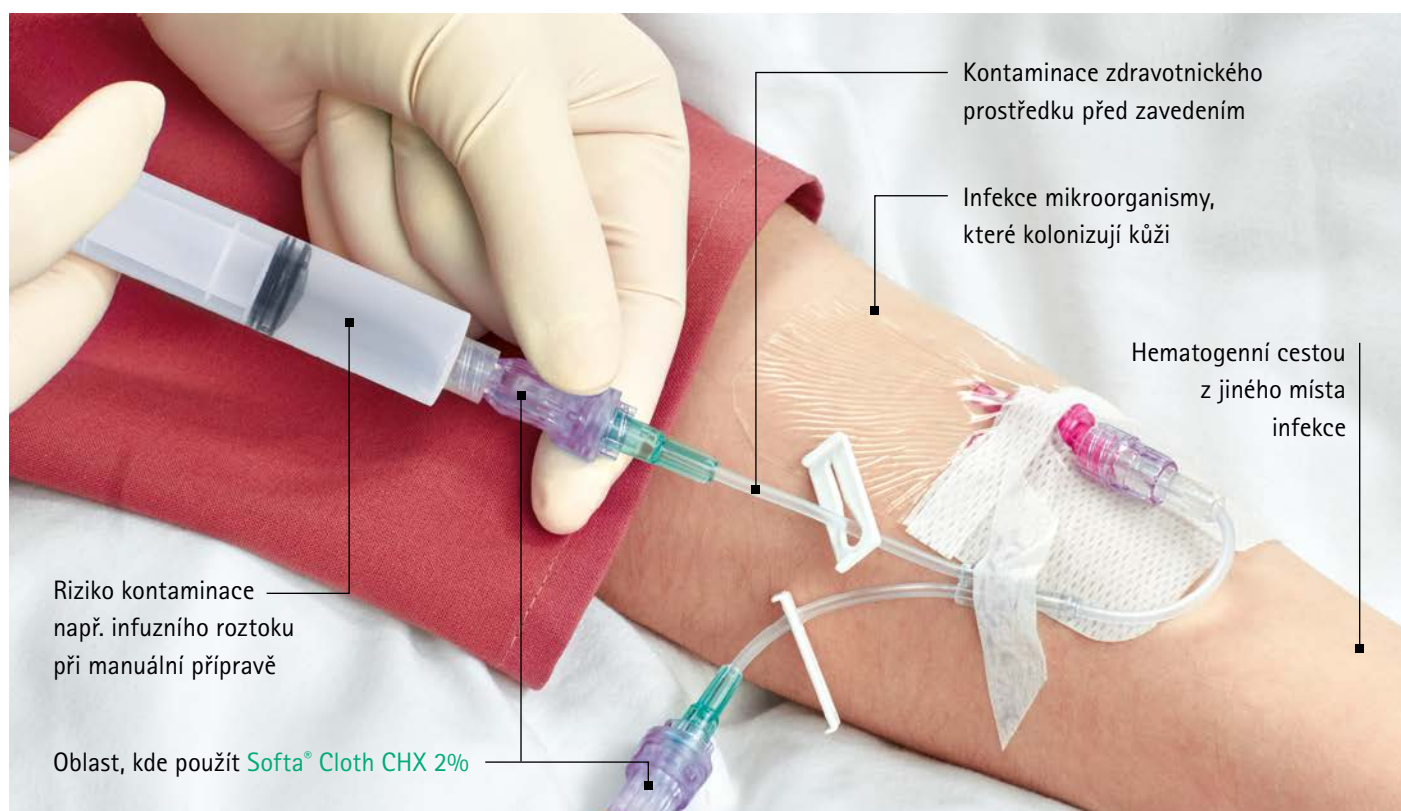

CRBSI – Central venous catheter related bloodstream infection (infekce způsobené katétrem zavedeným do krevního řečiště)


HAI – Healthcare-associated infections (infekce spojené se zdravotní péčí)

¹ Gahlot R, Nigam C, Kumar V, Yadav G, Anupurba S. Catheter-related bloodstream infections. Int J Crit Illn Inj Sci. 2014 Apr;4(2):162-7. doi: 10.4103/2229-5151.134184. PMID: 25024944; PMCID: PMC4093967. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4093967>


² Soi V, Moore CL, Kumbhar L, Yee J. Prevention of catheter-related bloodstream infections in patients on hemodialysis: challenges and management strategies. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2016 Apr 18;9:95-103. doi: 10.2147/IJNRD.S76826. PMID: 27143948; PMCID: PMC4846073. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4846073>

Návod k použití

Softa® Cloth CHX 2% jsou jednorázové alkoholové utěrky s 2% CHX určené pro povrchovou dezinfekci a dekontaminaci zdravotnických prostředků, zejména pak spojů infuzní linky. Jsou kompatibilní s trojcestnými kohouty **Discofix® C** a bezjehlovými vstupy **CareSite™** a **SafeFlow**. Nejsou určeny k použití na zařízeních pro invazivní zákroky.

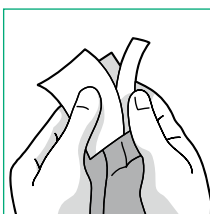


Nasad'te si rukavice a vyjměte ubrousek ze sáčku.

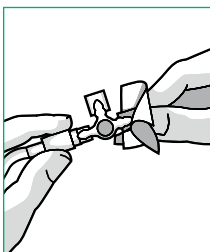


Vizuálně čistý zdravotnický prostředek utírejte otáčivým pohybem utěrkou po dobu nejméně 5 sekund. Přípravek rozetřete na celý povrch zdravotnického prostředku.

V případě viditelné kontaminace postupujte ve dvou krocích:

1. Nejprve odstraňte znečištění pomocí utěrky Softa® Cloth CHX 2%.
2. Poté vyjměte ze sáčku novou utěrku Softa® Cloth CHX 2% a proveďte dezinfekci – utírejte zdravotnický prostředek po celém povrchu otáčivým pohybem utěrkou po dobu nejméně 5 sekund.

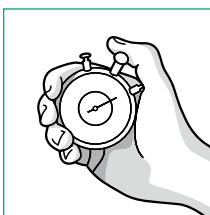

Po uplynutí expoziční doby nechejte povrch uschnout. Neutírejte do sucha.

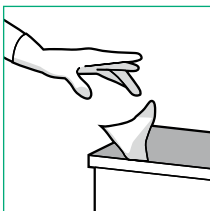

Utěrku po použití zlikvidujte.

Produkt	Kusů v balení	Katalogové č.
Softa® Cloth CHX 2%	100	19581

Složení

70% v/v isopropyl alcohol, 2% w/v chlorhexidine gluconate

Účinnost

Baktericidní, levurocidní

Rozměry

Rozložená utěrka: 162 × 150 mm

Složená utěrka: 42 × 32 mm



Upozornění:

Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Pouze pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Utěrky Softa® Cloth CHX 2%, Discofix® C, CareSite™ a Safeflow jsou zdravotnické prostředky.

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

CZ0083_2024-04-02